

TSUDAKOMA

PARA CARRY II

車いす・バギーの運搬用携帯スロープ
パラキャリーII



注意

車いすやバギーに人を乗せた状態で使用しないでください。
普通電動車いすには使用できません。



パラキャリーは車いすやバギーの積み降ろしに苦労されていたお母さんの声をカタチにしたスロープです。

積み降ろしに便利なスロープです

- 炭素繊維強化プラスチックを使用し、軽量でコンパクトです。
- 自動車にも積載しやすい 120cm です。
- レール間に足を踏み込めるので、車いす・バギーを押し上げやすいです。



120cm

携帯時たたんだ状態

持ち運び易い
2本レール



使用時広げた状態

レール間に足を踏込めるため、積み込みが
らくらく




炭素繊維強化プラスチック使用
軽量でコンパクト



車に積載し外出先へ
持ち運べる



使用方法 **注意** 車いすやバギーに人を乗せた状態で使用しないでください。

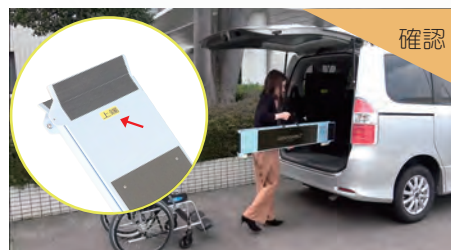

① 裏面の「上端シール」がある方を段差上側にします。



② 車の荷台・段差に設置します。



③ 前後両方の車輪位置を確認し車いすを押し上げます。



④ レール間に足を入れて車内へ積み込みます。



⑤ パラキャリー II を2つにたたみます。




⑥ 車内に積み込みます。

連結ベルト選択方法

* 購入時にはご使用の車いすに合わせた連結ベルトが1セット付属します。

最初に、設置場所の幅が①【スロープの設置幅】内に入るか確認します。次に、下の表から適切なベルトサイズをお選びください。一般的な車いすの場合は、連結ベルトのSサイズ、またはMサイズがご利用頂けます。電動車いすやバギーに使用する場合は、②【前輪内側間の長さ】と③【後輪外側間の長さ】を測り、下の表から適切なサイズを選びます。

①の設置幅	②の長さ	③の長さ	ベルトサイズ (長さ)
65.5 cm	33~56 cm	33~59 cm	S (23 cm)
70.5 cm	36~61 cm	36~64 cm	M (28 cm)
75.5 cm	43~66 cm	43~69 cm	L (33 cm)

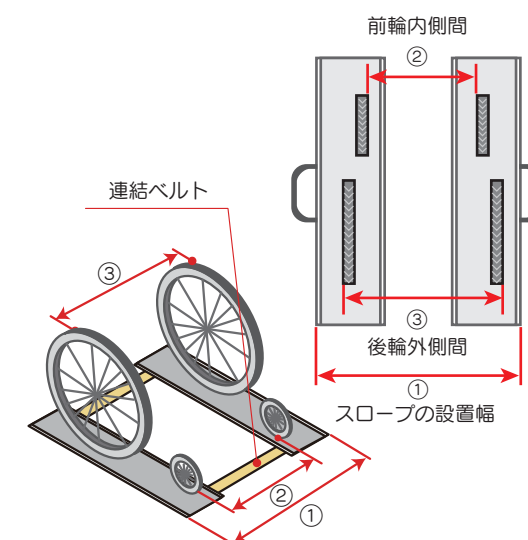

注意

使用可能な段差は、ご使用の方の体力や車いすの種類によって異なりますので、事前にご確認ください。なお、デモ機の貸出も行っておりますので、ご希望の方はお近くの販売店までお問合せください。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 使用方法については、Web サイト動画でもご紹介しています。裏表紙のQRコードよりアクセスしてください。

製品仕様 2本レール型 携帯スロープ（連結ベルト1セット付属）


品名		車いす運搬専用 パラキャリー II
サイズ	全長	120cm
	レール幅	21cm
	側壁高さ	3.0cm
材質	本体	アルミ合金
	裏面	炭素繊維強化プラスチック (CFRP)
重量		約 4.1kg/ セット
耐荷重		80kg/2 本セット (40kg/レール 1 本)
スロープ設置幅 (連結ベルト付の時)	S: ベルト長 23cm	65.5cm
	M: ベルト長 28cm	70.5cm
	L: ベルト長 33cm	75.5cm
希望小売価格（消費税込） [本体価格]		112,200 円 [102,000 円]
品名		交換用連結ベルト【別売】
希望小売価格（消費税込） [本体価格]		2,420 円 [2,200 円]



- *ご購入・デモ機の貸出しを希望される方は最寄りの販売店にお問合せください。
- *日常生活用具の申請対象製品です。制度については地元の市町村へご確認ください。
- *このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。
詳細につきましては、津田駒工業（株）または販売店までご相談ください。
- *このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

実績ある自社製造装置で製造しています。

津田駒は、CFRP部品生産用装置メーカーです。
 PARA CARRY II は、航空機部品生産などで実績のある
 自社開発装置を使用し製造しております。
 設計から製造、販売まで自社一貫体制で、安心・安全な
 スロープを提供いたします。

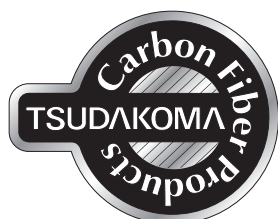

お問合せ・販売・製造

津田駒工業株式会社



〒921-8650 石川県金沢市野町 5 丁目 18 番 18 号
 TEL: 076-242-1116 FAX: 076-242-4172
 E-mail: para_rail@tsudakoma.co.jp



販売店

C11YUF00DJ